

**PRODUKTKATALOG 2025**

**PRODUKTE FÜR DIE PFLEGE**



Vertrieb in Deutschland, Österreich und Schweiz durch:

**siNpress® GmbH**

Wellingsbüttler Weg 79 | D-22391 Hamburg

☎ +49 40 536 30 788 | 📠 +49 40 600 99 252

[info@siNpress.de](mailto:info@siNpress.de) | [www.siNpress.de](http://www.siNpress.de)

## PRODUKTE FÜR DIE PFLEGE

Unser umfassendes Sortiment an Pflegeprodukten bietet innovative Lösungen, die auf die Bedürfnisse von Menschen mit besonderen Anforderungen zugeschnitten sind.



**PFLEGEDECKE**



**PFLEGESCHLAFSACK**



**PROTAC® KUGELDECKE™**

Im Mittelpunkt unseres Angebots stehen verschiedene Ausführungen der Pflegedecke, die als humane Alternative zur Fixierung bei Demenzpatienten dient. Diese speziell entwickelten Decken bieten Sicherheit und Komfort, ohne die Bewegungsfreiheit einzuschränken.

Darüber hinaus bieten wir den Pflegeschlafsack an, der das Risiko einer Unterkühlung minimiert und somit einen ungestörten und warmen Schlaf gewährleistet. Dies ist besonders wichtig für Menschen, die dazu neigen, sich im Schlaf zu entblößen.

Ein weiteres Highlight unseres Sortiments ist die PROTAC® KUGELDECKE™, ein anerkanntes Hilfs- und Therapiemittel zur sensorischen Integration. Die KUGELDECKE™ ist mit speziellen Kugeln gefüllt, die einen sanften, aber wirkungsvollen Druck ausüben. Dieser Druck kann beruhigend wirken und wird in der Therapie von Kindern, Erwachsenen und Senioren mit sensorischen Verarbeitungsstörungen eingesetzt.

Unsere Pflegeprodukte sind vielseitig einsetzbar und finden ihren Platz in Einrichtungen wie Pflegeheimen, Tagesstätten, Krankenhäusern sowie Aufenthaltsräumen. Sie sind auch ideal für den Einsatz in Privathaushalten, wo sie die Pflege und das Wohlbefinden der Anwender unterstützen.

## INHALTSVERZEICHNIS

### PFLEGEDECKE

|   |    |
|---|----|
| Pflegedecke, eine humane Alternative zu Fixiergurten .....    | 2  |
| Handhabung Spannbettlaken-Pflegedecke .....                   | 3  |
| Handhabung Pflegedecke integriertes System .....              | 4  |
| Spannbettlaken-Pflegedecke aus Mikrofaser S254.....           | 5  |
| Spannbettlaken-Pflegedecke mit KANECARON™-Anteil S254TN ..... | 6  |
| Pflegedecke integriertes System aus Mikrofaser S254D .....    | 7  |
| Gegenüberstellung Material Pflegedecke .....                  | 8  |
| Material Mikrofaser .....                                     | 9  |
| Material mit KANECARON™-Anteil .....                          | 10 |

### PFLEGESCHLAFSACK

|                              |    |
|------------------------------|----|
| Material Mikrofaser .....    | 11 |
| Pflegeschlafsack S254D ..... | 12 |

### PROTAC® KUGELDECKE™

|  |    |
|--|----|
| Was Sie über die PROTAC® Produkte wissen sollten ..... | 13 |
| PROTAC® KUGELDECKE™ CLASSIC PR101 .....                | 14 |
| PROTAC® KUGELDECKE™ FLEXIBLE PR201 .....               | 15 |
| PROTAC® KUGELDECKE™ GRANULAT PR419 .....               | 16 |
| PROTAC® KUGELDECKE™ Inkontinenzbezug PR302 .....       | 17 |

Vertrieb in Deutschland, Österreich und Schweiz durch:

**siNpress® GmbH**

Wellingsbüttler Weg 79 | D-22391 Hamburg

☎ +49 40 536 30 788 | 📠 +49 40 600 99 252

✉ info@siNpress.de | [www.siNpress.de](http://www.siNpress.de)

## PRODUKTKATALOG 2025

## PRODUKTE FÜR DIE PFLEGE



**PFLEGEDECKE**



**PFLEGESCHLAFSACK**



**PROTAC® KUGELDECKE™**

Vertrieb in Deutschland, Österreich und Schweiz durch:

**siNpress® GmbH**

Wellingsbüttler Weg 79 | D-22391 Hamburg

☎ +49 40 536 30 788 | 📠 +49 40 600 99 252

[info@siNpress.de](mailto:info@siNpress.de) | [www.siNpress.de](http://www.siNpress.de)

## PFLEGEDECKE, EINE HUMANE ALTERNATIVE ZU FIXIERGURTEN

Die Pflegedecke, eine humane Alternative zu Fixiergurten, ist speziell für unruhige und bettlägerige Bewohner geeignet und bietet das ideale Gleichgewicht zwischen Schutz und Bewegungsfreiheit bei hohem Schlaf- und Ruhekomfort unter einer flauschigen Decke aus weichem Mikrofaserstoff oder mit KANECARON™.

Sie beugt Freiliegen vor (keine Unterkühlung), verhindert Kratzen an der Haut, vermeidet eventuelles Verschmieren von Wunden etc. oder das Entfernen von Schutzhose, Dauerkathetern. Die besondere Konstruktion verhindert, dass der Pflegebedürftige unbeabsichtigt aus dem Bett stürzen kann oder beabsichtigt unkontrolliert das Bett verlassen kann.

Die Pflegedecke bietet als humane Alternative zu Fixiergurten mehrere Vorteile:

- ✓ Sicherheit und Bewegungsfreiheit: Die Pflegedecke ermöglicht es den Bewohnern, sich sicher und frei zu bewegen, ohne mit Gurten fixiert zu sein.
- ✓ Schutz ohne Einschränkung: Sie bietet Schutz, ohne die Bewohner unnötig einzuschränken, und fördert so das Selbstwertgefühl und die Aktivität.
- ✓ Komfort: Die Pflegedecken sind oft aus weichem Mikrofaserstoff gefertigt, was einen hohen Schlaf- und Ruhekomfort bietet.
- ✓ Vermeidung von Verletzungen: Im Vergleich zu Fixiergurten, die zu schwerwiegenden Verletzungen führen können, ist die Pflegedecke eine sicherere Option.
- ✓ Schlüssel zur besseren Lebensqualität: Pflegedecken können als nicht-pharmakologische Intervention zur Verbesserung des Wohlbefindens und der Schlafqualität beitragen.
- ✓ Ethische Aspekte: Die Verwendung von Pflegedecken respektiert die persönliche Würde und Freiheit der Bewohner.

Es ist wichtig, dass solche Maßnahmen immer individuell abgewogen und im besten Interesse der pflegebedürftigen Person eingesetzt werden. Die Pflegedecke kann in vielen Fällen eine gute Lösung sein, um die Sicherheit der Bewohner zu gewährleisten, ohne ihre Freiheit unnötig einzuschränken.

Unsere Pflegedecken werden als Alternative zu Fixiergurten vom **AlzheimerForum** benannt. Informationen darüber finden Sie im [Alzheimer Forum](#) von Friedhelm Henke, Anröchte-Berge unter Alternativen zu Fixiergurten beschrieben.



### WICHTIGER HINWEIS - BITTE BEACHTEN:

- ✓ Das Pflegedeckenprogramm ist ein Mittel zur humaneren Fixierung anstelle von Fixiergurten.
- ✓ Die Pflegedecke befreit nicht von der Fürsorgepflicht zum Patienten.
- ✓ Diese Produkte dürfen nur durch geschulte Pflegekräfte unter Beachtung der bestehenden Gesetze angewendet werden.
- ✓ Die Bettseitengitter sind stets hoch zu stellen.

Vertrieb in Deutschland, Österreich und Schweiz durch:

**siNpress® GmbH**

Wellingsbüttler Weg 79 | D-22391 Hamburg

☎ +49 40 536 30 788 | 📠 +49 40 600 99 252

[info@siNpress.de](mailto:info@siNpress.de) | [www.siNpress.de](http://www.siNpress.de)

siNpress

## HANDHABUNG SPANNBETTLAKEN-PFLEGEDECKE

Für das Pflegepersonal ist die Pflegedecke im Spannbettlaken-System einfach anzubringen:


Die Pflegedecke wird am Fußende um die Matratze gelegt. Der Pflegebedürftige wird in die Liegeposition gebracht und ihm die Pflegedecke über das Nachtgewand angezogen. Anschließend wird die Pflegedecke um die Matratze befestigt. Danach wird sie über den zentralen Reißverschluss von oben nach unten geschlossen. Die 2 kleineren Reißverschlüsse an der Seite sind als Passage für Katheter- oder Infusionsschläuche gedacht.

Der Benutzer liegt wie in einem Schlafsack und hat einen großen Bewegungsspielraum - er nutzt die gesamte Bettfläche ohne Einschränkungen. Er kann sowohl auf dem Rücken als auch auf der Seite liegen, sich aufrichten und die Knie anziehen. Ebenso genießt er volle Bewegungsfreiheit von Armen, Händen und auch im Fußbereich.

Der Pflegebedürftige hat aber erhebliche Hürden, den Hauptreißverschluss zu öffnen. Er ist in der Regel nicht in der Lage, den Reißverschluss vom Fußende her aufzumachen.

Die hochwertigen Markenspiralverschlüsse mit Feststellschieber sind hautfreundlich und verletzungsarm. Sie haben keine Zacken, die verwunden können. Eine große Lasche über dem Mittel-Reißverschluss schützt zudem vor dem Aufscheuern.

SPANNBETTLAKEN-SYSTEM

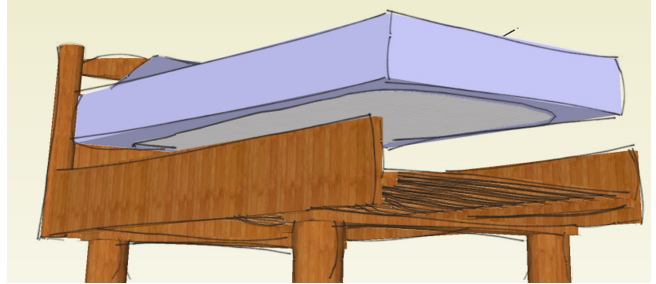

Schutz vor Aufscheuern am Hals mit grosser Lasche über dem Mittel-Reißverschluss



### WICHTIGER HINWEIS - BITTE BEACHTEN:

- ✓ Das Pflegedeckenprogramm ist ein Mittel zur humaneren Fixierung anstelle von Fixiergurten.
- ✓ Die Pflegedecke befreit nicht von der Fürsorgepflicht zum Patienten.
- ✓ Diese Produkte dürfen nur durch geschulte Pflegekräfte unter Beachtung der bestehenden Gesetze angewendet werden.
- ✓ Die Bettseitengitter sind stets hoch zu stellen.

Vertrieb in Deutschland, Österreich und Schweiz durch:

**siNpress® GmbH**

Wellingsbüttler Weg 79 | D-22391 Hamburg

☎ +49 40 536 30 788 | 📠 +49 40 600 99 252

[info@siNpress.de](mailto:info@siNpress.de) | [www.siNpress.de](http://www.siNpress.de)


## HANDHABUNG PFLEGEDECKE INTEGRIERTES SYSTEM

Für aktivere Pflegebedürftige, welche noch selbständig aufstehen und umher wandern wollen und können, wurde das integrierte Pflegedecken-System entwickelt. Hier wird die Matratze mit der Pflegedecke umschlossen.

Das Pflegepersonal legt zuerst die untere Lage Stoff unter die Matratze. Das Oberteil der Pflegedecke wird am Fußende auf die Matratze platziert. Der Pflegebedürftige wird nun in die Liegeposition gebracht und ihm die Pflegedecke über das Nachtgewand angezogen.

Anschließend wird durch den rundum laufenden zweigeteilten Reißverschluss das Ober- mit dem Unterteil der integrierten Pflegedecke jeweils vom Kopfende her miteinander verbunden. Über den mittigen Haupt-Reißverschluss wird die Pflegedecke geschlossen und kann aber für Supportaufgaben wie Windelwechsel schnell wieder geöffnet werden.

Hier ein Video zur Handhabung des integrierten Pflegedecken-Systems:

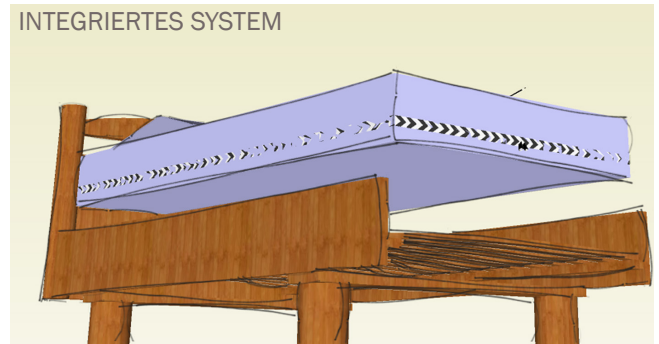

Schutz mit Laschen vor Öffnen und auch vor Verletzungen durch die Reißverschlüsse



siNpress  
www.siNpress.de

carecomfort

Integrierte Pflegedecke S254D mit Mittelreißverschluss

Ansehen auf YouTube

Zum Waschen des Pflegedecken-Oberteils kann das Unterteil der integrierten Pflegedecke auch unter der Matratze verbleiben. Wir empfehlen jedoch das Waschen des kompletten integrierten Pflegedecken-Systems bei geschlossenen Reißverschlüssen. Insbesondere sollten die integrierten Pflegedecken komplett gewaschen werden, wenn mehrere Pflegedecken gereinigt werden. Das Oberteil des einen Systems passt nicht zum anderen.

### WICHTIGER HINWEIS - BITTE BEACHTEN:

- ✓ Das Pflegedeckenprogramm ist ein Mittel zur humaneren Fixierung anstelle von Fixiergurten.
- ✓ Die Pflegedecke befreit nicht von der Fürsorgepflicht zum Patienten.
- ✓ Diese Produkte dürfen nur durch geschulte Pflegekräfte unter Beachtung der bestehenden Gesetze angewendet werden.
- ✓ Die Bettseitengitter sind stets hoch zu stellen.

Vertrieb in Deutschland, Österreich und Schweiz durch:

**siNpress® GmbH**

Wellingsbüttler Weg 79 | D-22391 Hamburg

☎ +49 40 536 30 788 | 📠 +49 40 600 99 252

✉ info@siNpress.de | [www.siNpress.de](http://www.siNpress.de)

**Produkt: Pflegedecke  
Spannbettlaken-System**

**Artikel-Nr.: S254**



Die Pflegedecke, eine humane Alternative zu Fixiergurten, ist speziell für unruhige und bettlägerige Bewohner geeignet und bietet das ideale Gleichgewicht zwischen Schutz und Bewegungsfreiheit bei hohem Schlaf- und Ruhekomfort unter einer flauschigen Decke aus weichem Mikrofaser-tuch.

Sie beugt Freiliegen vor (keine Unterkühlung), verhindert Kratzen an der Haut, vermeidet eventuelles Verschmieren von Wunden etc. oder das Entfernen von Schutzhose, Dauerkathetern. Die besondere Konstruktion verhindert, dass der Pflegebedürftige unbeabsichtigt aus dem Bett stürzen kann oder beabsichtigt unkontrolliert das Bett verlassen kann.

In vielen Fällen reicht die Pflegedecke, die wie ein Spannbettbezug unter der Matratze befestigt wird, aus.

**Merkmale & Vorteile**

- ✓ Patient findet ausreichend Platz - keine Bewegungseinschränkung. Er kann sitzen und auch auf der Seite liegen. Patient kann liegend und sitzend angezogen werden.
- ✓ Die Schieber der Reißverschlüsse sind jeweils mit einer mit Druckknöpfen fixierten Lasche bedeckt, um Druckstellen und Hautirritationen zu vermeiden. Damit kann der Patient sich nicht an den kantigen Teilen verletzen, hat aber auch ein kleines zusätzliches Hindernis beim Öffnen des Reißverschlusses. Zusätzlich sind die Reißverschlussenden vom Kopf her und damit von den Händen des Patienten weg, angebracht. Für die Reißverschlüsse werden hochwertige, weiche und extrem stabile Nylon-Reißverschlüsse mit Kunststoffzähnen eingesetzt.
- ✓ Unisex: für Männer und Frauen gleichermaßen geeignet.
- ✓ Die feuerhemmende Funktion ist dauerhaft in der Polyesterfaser verankert.
- ✓ Empfohlen für Hausstaub-Allergiker und Rheumatiker. Der Stoff benötigt sehr kurze Wasch- und Trockenzeiten, einen geringen Wasser- und Waschmittelverbrauch und führt damit zu reduzierten Kosten für den Unterhalt in der Betreuung.
- ✓ Die hydrophilen und antibakteriellen Eigenschaften des Polyestergewebes sorgen dafür, dass der Stoff Schweiß absorbiert und erhöht somit den Komfort für den Benutzer.
- ✓ Produziert nach OEKO-TEX® Standard 100 (Produktklasse II). Die Pflegedecke ist CE-zertifiziert.

**Für wen ist dieses Produkt geeignet?**

- ✓ Pflegeabteilungen, z.B. bei Demenz,
- ✓ Autismuspflege,
- ✓ Verhaltensgesundheitspflege,
- ✓ Psychiatrische Einrichtungen.



**Material**

100% Polyester gestrickte Mikrofaser TREVIRA® CS-FR

**Feuertest**

EN ISO 15025-2016 Abschnitt 5: Zündquelle

kleine offene Flamme und glühende Zigarette

dauerhaft bestanden.

Prüfung der Formstabilität

Hervorragende Ergebnisse erzielt. Konstante Leistung nach 100 Wäschen.

**Produktmerkmale**

Größe

Einheitsgröße für Matratzen 200 x 90 x 12-15 cm (LxBxH)

Farben

Stahlblau 301 / Graugrün 401

Produziert in

Europa / lieferbar ab Lager Hamburg

**Pflege- und Waschinweise**

Maschinenwaschbar bis zu 60°C. Das Material ist kochfest, d.h. Waschen ist möglich bis 90°C. Dunkle Farben separat waschen. Nicht mit Weichspüler waschen. Nicht bleichen und nicht in den Trockner geben. Nicht bügeln. Nicht chemisch reinigen. Nutzen Sie das Produkt nicht, wenn es beschädigt ist. Vor Gebrauch stets prüfen. Nicht in kontaminiertem Zustand liegen lassen, sondern sofort waschen. Bei Nichtgebrauch an einem kühlen, trockenen Ort ohne direkte Sonneneinstrahlung aufbewahren. Wir empfehlen, stets die Reißverschlüsse während des Waschens zu schließen und das Produkt wegen der Flusenbildung anderer Wäschestücke separat zu waschen.

**Modelle**

Pflegedecke Spannbettlakensystem

| S254                    | AA301 | BA301 | CA401 |
|-------------------------|-------|-------|-------|
| Größe*                  | II    | II    | II    |
| Ärmel                   | x     | ✓     | x     |
| Farbe                   | 301   | 301   | 401   |
| Schulter-Reißverschluss | x     | x     | ✓     |

\* Größe I für kleine Personen, Größe II für normale, große Personen.




Pflegedecke mit Ärmel - S254BA301



Pflegedecke für Kontraktionen - S254CA401



Pflegedecke ohne Ärmel - S254AA301

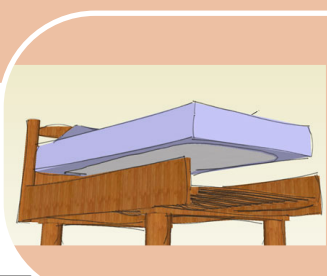

**Vertrieb in Deutschland, Österreich und Schweiz durch:**

**siNpress® GmbH**

Wellingsbüttler Weg 79 | D-22391 Hamburg

☎ +49 40 536 30 788 | ☎ +49 40 600 99 252

✉ [info@siNpress.de](mailto:info@siNpress.de) | [www.siNpress.de](http://www.siNpress.de)

**Produkt: Pflegedecke  
Spannbettlaken-System**

**Artikel-Nr.: S254TN**



Die Pflegedecke, eine humane Alternative zu Fixiergurten, ist speziell für unruhige und bettlägerige Bewohner geeignet und bietet das ideale Gleichgewicht zwischen Schutz und Bewegungsfreiheit bei hohem Schlaf- und Ruhekomfort unter einer flauschigen Decke aus weichem KANECARON™.

Sie beugt Freiliegen vor (keine Unterkühlung), verhindert Kratzen an der Haut, vermeidet eventuelles Verschmieren von Wunden etc. oder das Entfernen von Schutzhose, Dauerkathetern. Die besondere Konstruktion verhindert, dass der Pflegebedürftige unbeabsichtigt aus dem Bett stürzen kann oder beabsichtigt unkontrolliert das Bett verlassen kann.

In vielen Fällen reicht die Pflegedecke, die wie ein Spannbettbezug unter der Matratze befestigt wird, aus.

**Merkmale & Vorteile**

- ✓ Patient findet ausreichend Platz - keine Bewegungseinschränkung. Er kann sitzen und auch auf der Seite liegen. Patient kann liegend und sitzend angezogen werden.
- ✓ Die Schieber der Reißverschlüsse sind jeweils mit einer mit Druckknöpfen fixierten Lasche bedeckt, um Druckstellen und Hautirritationen zu vermeiden. Damit kann der Patient sich nicht an den kantigen Teilen verletzen, hat aber auch ein kleines zusätzliches Hindernis beim Öffnen des Reißverschlusses. Zusätzlich sind die Reißverschlussenden vom Kopf her und damit von den Händen des Patienten weg, angebracht.
- ✓ Für die Reißverschlüsse werden hochwertige, weiche und extrem stabile Nylon-Reißverschlüsse mit Kunststoffzähnen eingesetzt.
- ✓ Unisex: für Männer und Frauen gleichermaßen geeignet.
- ✓ Die feuerhemmende Funktion ist dauerhaft in der Polyesterfaser verankert.
- ✓ Empfohlen für Hausstaub-Allergiker und Rheumatiker. Der Stoff benötigt sehr kurze Wasch- und Trockenzeiten, einen geringen Wasser- und Waschmittelverbrauch und führt damit zu reduzierten Kosten für den Unterhalt in der Betreuung.
- ✓ Die hydrophilen und antibakteriellen Eigenschaften des Polyestergewebes sorgen dafür, dass der Stoff Schweiß absorbiert und erhöht somit den Komfort für den Benutzer.
- ✓ Produziert nach OEKO-TEX® Standard 100 (Produktklasse II).

**Für wen ist dieses Produkt geeignet?**

- ✓ Pflegeabteilungen, z.B. bei Demenz,
- ✓ Autismuspflege,
- ✓ Verhaltensgesundheitspflege,
- ✓ Psychiatrische Einrichtungen.



**Material**

45 % KANECARON™ Sby/Viskose - 25 % PES, 30 % PES-Füllung

**Feuertest**

EN ISO 15025-2016  
Abschnitt 5: Zündquelle

kleine offene Flamme und glühende Zigarette  
dauerhaft bestanden.

Prüfung der Formstabilität

Hervorragende Ergebnisse erzielt. Konstante Leistung nach 50 Wäschen.

**Produktmerkmale**

|               |   |
|---------------|---|
| Größe         | II - Einheitsgröße für Matratzen 200/210 x 80/90 x 12 cm (LxBxH) - für normale und große Personen |
| Farben        | Wollweiss 101   |
| Produziert in | Europa / lieferbar ab Lager Hamburg   |

**Pflege- und Waschinweise**

Maschinenwaschbar bis zu 60°C im Schongang. Dunkle Farben separat waschen. Nicht mit Weichspüler waschen. Nicht bleichen und trocknen nur im Schongang. Nicht bügeln. Trocken reinigen möglich. Nutzen Sie das Produkt nicht, wenn es beschädigt ist. Vor Gebrauch stets prüfen. Nicht in kontaminiertem Zustand liegen lassen, sondern sofort waschen. Bei Nichtgebrauch an einem kühlen, trockenen Ort ohne direkte Sonneneinstrahlung aufbewahren. Wir empfehlen, stets die Reißverschlüsse während des Waschens zu schließen und das Produkt wegen der Flusenbildung anderer Wäschestücke separat zu waschen.



**Modelle**

Pflegedecke Spannbettlakensystem

| S254TN                  | 101 |
|-------------------------|-----|
| Ärmel                   | x   |
| Farbe                   | 101 |
| Schulter-Reißverschluss | x   |



Mittel-Reißverschluss



Katheter-Reißverschluss

**Vertrieb in Deutschland, Österreich und Schweiz durch:**

**siNpress® GmbH**

Wellingsbüttler Weg 79 | D-22391 Hamburg

☎ +49 40 536 30 788 | ☎ +49 40 600 99 252

✉ [info@siNpress.de](mailto:info@siNpress.de) | [www.siNpress.de](http://www.siNpress.de)



**Produkt: Pflegedecke  
integriertes System**

**Artikel-Nr.: S254D**



Die Pflegedecke, eine humane Alternative zu Fixiergurten, ist speziell für unruhige und bettlägerige Bewohner geeignet und bietet das ideale Gleichgewicht zwischen Schutz und Bewegungsfreiheit bei hohem Schlaf- und Ruhekomfort unter einer flauschigen Decke aus weichem Mikrofaser Tuch.

Sie beugt Freiliegen vor (keine Unterkühlung), verhindert Kratzen an der Haut, vermeidet eventuelles Verschmieren von Wunden etc. oder das Entfernen von Schutzhose, Dauerkathetern. Die besondere Konstruktion verhindert, dass der Pflegebedürftige unbeabsichtigt aus dem Bett stürzen kann oder beabsichtigt unkontrolliert das Bett verlassen kann.

Die Modelle des integrierten Pflegedecken-Systems werden durch einen umlaufenden Reißverschluss am unter der Matratze befindlichen Teil mit dem oberen Teil verbunden.

**Merkmale & Vorteile**

- ✓ Patient findet ausreichend Platz - keine Bewegungseinschränkung. Er kann sitzen und auch auf der Seite liegen. Patient kann liegend und sitzend angezogen werden.
- ✓ Die Schieber der Reißverschlüsse sind jeweils mit einer mit Druckknöpfen fixierten Lasche bedeckt, um Druckstellen und Hautirritationen zu vermeiden. Damit kann der Patient sich nicht an den kantigen Teilen verletzen, hat aber auch ein kleines zusätzliches Hindernis beim Öffnen des Reißverschlusses. Zusätzlich sind die Reißverschlussenden vom Kopf her und damit von den Händen des Patienten weg, angebracht. Für die Reißverschlüsse werden hochwertige, weiche und extrem stabile Nylon-Reißverschlüsse mit Kunststoffzähnen eingesetzt.
- ✓ Unisex: für Männer und Frauen gleichermaßen geeignet.
- ✓ Die feuerhemmende Funktion ist dauerhaft in der Polyesterfaser verankert.
- ✓ Empfohlen für Hausstaub-Allergiker und Rheumatiker. Der Stoff benötigt sehr kurze Wasch- und Trockenzeiten, einen geringen Wasser- und Waschmittelverbrauch und führt damit zu reduzierten Kosten für den Unterhalt in der Betreuung.
- ✓ Die hydrophilen und antibakteriellen Eigenschaften des Polyestergewebes sorgen dafür, dass der Stoff Schweiß absorbiert und erhöht somit den Komfort für den Benutzer.
- ✓ Produziert nach OEKO-TEX® Standard 100 (Produktklasse II). Die Pflegedecke ist CE-zertifiziert.

**Für wen ist dieses Produkt geeignet?**

- ✓ Pflegeabteilungen, z.B. bei Demenz,
- ✓ Autismuspflege,
- ✓ Verhaltensgesundheitspflege,
- ✓ Psychiatrische Einrichtungen.

**Material**

100% Polyester  
gestrickte Mikrofaser  
TREVIRA® CS-FR

**Feuertest**

EN ISO 15025-2016  
Abschnitt 5: Zündquelle

kleine offene  
Flamme und  
glühende Zigarette

dauerhaft  
bestanden.

Prüfung der  
Formstabilität

Hervorragende Ergebnisse erzielt.  
Konstante Leistung nach 100 Wäschen.

**Produktmerkmale**

Größen

Einheitsgrößen für Matratzen 200 x 90 x 12-20 cm (LxBxH)

Farben

Stahlblau 301 / Graugrün 401

Produziert in

Europa / lieferbar ab Lager Hamburg

**Pflege- und  
Waschhinweise**

Maschinenwaschbar bis zu 60°C. Das Material ist kochfest, d.h. Waschen ist möglich bis 90°C. Dunkle Farben separat waschen. Nicht mit Weichspüler waschen. Nicht bleichen und nicht in den Trockner geben. Nicht bügeln. Nicht chemisch reinigen. Nutzen Sie das Produkt nicht, wenn es beschädigt ist. Vor Gebrauch stets prüfen. Nicht in kontaminiertem Zustand liegen lassen, sondern sofort waschen. Bei Nichtgebrauch an einem kühlen, trockenen Ort ohne direkte Sonneneinstrahlung aufbewahren. Wir empfehlen, stets die Reißverschlüsse während des Waschens zu schließen und das Produkt wegen der Flusenbildung anderer Wäschestücke separat zu waschen.

**Modelle**

Pflegedecke Integriertes System

| S254                    | DA301 | DA401 | DC401 | DD301 | DD401 | DE301 | DE401 |
|-------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Größe                   | II    | I     | II    | II    | I     | II    | I     |
| Ärmel                   | ✓     | ✓     | x     | x     | x     | ✓     | ✓     |
| Farbe                   | 301   | 401   | 401   | 301   | 401   | 301   | 401   |
| Schulter-Reißverschluss | x     | x     | ✓     | x     | x     | x     | x     |
| Wechseldruckmatratze    | x     | x     | x     | x     | x     | ✓     | ✓     |

\* Größe I für kleine Personen (Kinder), Größe II für normale und große Personen.



Pflegedecke mit Ärmel - S254DA301



Pflegedecke für Kontrakturen - S254DC401



Pflegedecke ohne Ärmel - S254DD301

**Vertrieb in Deutschland, Österreich und Schweiz durch:**





**siNpress® GmbH**

Wellingsbüttler Weg 79 | D-22391 Hamburg

☎ +49 40 536 30 788 | ☎ +49 40 600 99 252

✉ info@siNpress.de | [www.siNpress.de](http://www.siNpress.de)
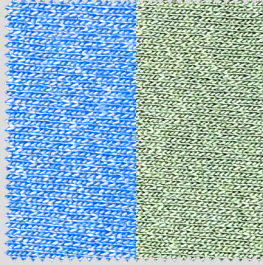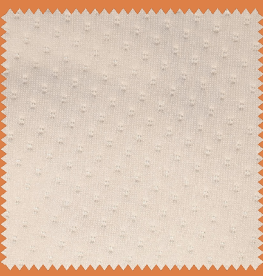
## GEGENÜBERSTELLUNG MATERIAL PFLEGEDECKE

| Eigenschaft                                       | Produkt   |
|---|---|
|   | <div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;"> <p><b>AM BELIEBTESTEN</b></p>  <p><b>MIKROFASER</b></p> </div> <div style="text-align: center;">  <p><b>MIT KANECARON™</b></p> </div> </div>  |
| <b>Farben</b>                                     | <div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;"> <p>stahlblau<br/>graugrün</p> </div> <div style="text-align: center;"> <p>wollweiß</p> </div> </div>  |
| <b>Material</b>                                   | <div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;"> <p>TREVIRA® CS-FR<br/>100 % Polyester</p> </div> <div style="text-align: center;"> <p>45 % KANECARON™<br/>Sby/Viskose - 25 % PES,<br/>30 % PES-Füllung</p> </div> </div>  |
| <b>Grammatur</b>                                  | <div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;"> <p>k. A.</p> </div> <div style="text-align: center;"> <p>300 - 320 g/m²</p> </div> </div>   |
| <b>Flammhemmend</b>                               | <div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;"> <p>ja, dauerhaft in der Faser<br/>DIN 4102, Klasse B1</p> </div> <div style="text-align: center;"> <p>ja, dauerhaft in der Faser</p> </div> </div>  |
| <b>Produziert nach<br/>OEKO-TEX® Standard 100</b> | <div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;"> <p>ja</p> </div> <div style="text-align: center;"> <p>ja</p> </div> </div>  |
| <b>CE-Zertifizierung</b>                          | <div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;"> <p>ja</p> </div> <div style="text-align: center;"> <p>nein</p> </div> </div>  |
| <b>Pflege- und Waschinweise</b>                   | <div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;"> <p>empfohlen bei 60° C,<br/>kochfest bis 90° C</p>  </div> <div style="text-align: center;"> <p>bis 60° C im Schongang</p>  </div> </div> |


## MATERIAL MIKROFASER

Das Material der Pflegedecke besteht aus einer hautsympathischen, atmungsaktiven und hochwertig gestrickten Mikrofaser aus 100% Polyester; zertifiziert nach Öko-Tex Standard 100. Der Stoff ist dauerhaft kuschelweich und flauschig, selbstglättend, leicht und elastisch. Auch nach oftmaligem Waschen bleibt er fusselfrei und formbeständig, robust und dabei langlebig in seiner Farbbrillanz und Lichtechtheit. Er bietet die perfekte Balance zwischen Funktion, Optik und Komfort.

Durch eine gezielte Modifikation des Polyester-Moleküls ist der Stoff permanent feuerhemmend und schwer entflammbar. Diese Eigenschaft geht selbst durch Gebrauch, Wäsche und Alterung nicht verloren. Nach einem Brandfall gibt es kein Nachglimmen und nur sehr geringe Rauchgasentwicklung. Der Stoff wurde in einer Vielzahl nationaler und internationaler Brandschutz-Prüfverfahren getestet und zertifiziert.

Aufgrund der besonderen Materialeigenschaften kann die Pflegedecke auch Hausstauballergikern und Rheumatikern empfohlen werden. Die Pflegedecke ist CE-zertifiziert.

Grundsätzlich kann die Pflegedecke in den folgenden Farben geliefert werden.

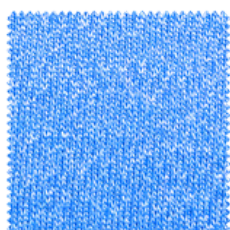

301 stahlblau



401 graugrün

### PRODUKTMERKMALE

|   |   |  |
|---|---|--|
| Material  | 100% Polyester TREVIRA® CS-FR   |  |
| Farbe   | Stahlblau / Graugrün  |  |
| Lieferbar   | ab Lager Hamburg  |  |
| Produziert  | in Europa   |  |
| Feuertest<br>EN ISO 15025-2016<br>Abschnitt 5: Zündquelle | kleine offene Flamme<br>und glühende Zigarette  | dauerhaft bestanden, da Teil der Faser |
| Prüfung der<br>Formstabilität                             | Hervorragende Ergebnisse erzielt. Konstante Leistung nach 100 Wäschen.  |  |
| Pflege- und<br>Waschhinweise                              | <p>Separates Waschen mit geschlossenen Reißverschlüssen und geringer Desinfektionswaschmittelzugabe bei niedriger Temperatur von 60° C in der Waschmaschine. Das Produkt wegen der Flusenbildung anderer Wäschestücke separat waschen.</p> <p>Grundsätzlich ist das Material kochfest, d.h. Waschen ist bis 90° C möglich. Der Stoff ist bügelfrei und sollte nicht im Trockner getrocknet werden. Eine Trocknernutzung ist zwar möglich, aber nicht erforderlich. Wenn doch notwendig: Schonendere Behandlungsart mit reduzierter thermischer Belastung (Temperatur 60° C) und kürzerer Behandlungsdauer wählen.</p> <p>HINWEIS: Der Einsatz von Weichspülern zerstört die Materialeigenschaften.</p> <p>Nutzen Sie das Produkt nicht, wenn es beschädigt ist. Vor Gebrauch stets prüfen. Nicht in kontaminiertem Zustand liegen lassen, sondern sofort waschen. Bei Nichtgebrauch an einem kühlen, trockenen Ort ohne direkte Sonneneinstrahlung aufbewahren.</p> |  |



Vertrieb in Deutschland, Österreich und Schweiz durch:

**siNpress® GmbH**

Wellingsbüttler Weg 79 | D-22391 Hamburg

+49 40 536 30 788 | +49 40 600 99 252

[info@siNpress.de](mailto:info@siNpress.de) | [www.siNpress.de](http://www.siNpress.de)

## MATERIAL MIT KANECARON™-ANTEIL

KANECARON™ ist eine Modacrylfaser, die durch Copolymerisation von Acrylnitril und Vinylchlorid hergestellt wird.

Einst als Öko-Alternative zu Pelz entwickelt, hat KANECARON™ inzwischen seinen Weg in viele Textilanwendungen gefunden. Diese reichen von Kuscheltieren, Füllungen für Bettdecken bis hin zu Heimtextilien, bei denen die Sicherheit zu berücksichtigen ist. KANECARON™ ist weich und nimmt Feuchtigkeit auf.

KANECARON™ enthält Vinylchlorid, das eine hervorragende Flammhemmung aufweist, und das Material selbst ist flammhemmend. Daher verschlechtert sich die Flammhemmung nicht aufgrund des Waschens. Auch wenn die Feuerquelle entfernt wird, brennt der Stoff nicht, sondern erlischt selbst.

Das Gewebe wird in den Niederlanden gestrickt.

Aufgrund der besonderen Materialeigenschaften kann die Pflegedecke auch Hausstauballergikern und Rheumatikern empfohlen werden.

Grundsätzlich kann die Pflegedecke in der folgenden Farbe geliefert werden.



101 wollweiss

### PRODUKTMERKMALE

|   |   |  |
|---|---|--|
| Material  | 45 % KANECARON™ Sby/Viskose – 25 % PES, 30 % PES-Füllung  |  |
| Farbe   | Wollweiss   |  |
| Lieferbar   | ab Lager Hamburg  |  |
| Produziert  | in den Niederlanden   |  |
| Feuertest<br>EN ISO 15025-2016<br>Abschnitt 5: Zündquelle | kleine offene Flamme<br>und glühende Zigarette  | dauerhaft bestanden, da Teil der Faser |
| Prüfung der<br>Formstabilität                             | Hervorragende Ergebnisse erzielt. Konstante Leistung nach 100 Wäschen.  |  |
| Pflege- und<br>Waschhinweise                              | <p>Separates Waschen mit geschlossenen Reißverschlüssen und geringer Desinfektionswaschmittelzugabe bei niedriger Temperatur von 60° C im Schongang in der Waschmaschine. Das Produkt wegen der Flusenbildung anderer Wäschestücke separat waschen.</p> <p>Der Stoff sollte im Trockner nur im Schongang getrocknet werden. Schonendere Behandlungsart mit reduzierter thermischer Belastung (Temperatur 60° C) und kürzerer Behandlungsdauer wählen.</p> <p>HINWEIS: Der Einsatz von Weichspülern zerstört die Materialeigenschaften.</p> <p>Nutzen Sie das Produkt nicht, wenn es beschädigt ist. Vor Gebrauch stets prüfen. Nicht in kontaminiertem Zustand liegen lassen, sondern sofort waschen. Bei Nichtgebrauch an einem kühlen, trockenen Ort ohne direkte Sonneneinstrahlung aufbewahren.</p> |  |



Vertrieb in Deutschland, Österreich und Schweiz durch:

**siNpress® GmbH**

Wellingsbüttler Weg 79 | D-22391 Hamburg

☎ +49 40 536 30 788 | 📠 +49 40 600 99 252

[info@siNpress.de](mailto:info@siNpress.de) | [www.siNpress.de](http://www.siNpress.de)

## PRODUKTKATALOG 2025

## PRODUKTE FÜR DIE PFLEGE



**PFLEGEDECKE**



**PFLEGESCHLAFSACK**



**PROTAC® KUGELDECKE™**

Vertrieb in Deutschland, Österreich und Schweiz durch:

**siNpress® GmbH**

Wellingsbüttler Weg 79 | D-22391 Hamburg

☎ +49 40 536 30 788 | 📠 +49 40 600 99 252

[info@siNpress.de](mailto:info@siNpress.de) | [www.siNpress.de](http://www.siNpress.de)


## MATERIAL MIKROFASER

Das Material der Pflegedecke besteht aus einer hautsympathischen, atmungsaktiven und hochwertig gestrickten Mikrofaser aus 100% Polyester; zertifiziert nach Öko-Tex Standard 100. Der Stoff ist dauerhaft kuschelweich und flauschig, selbstglättend, leicht und elastisch. Auch nach oftmaligem Waschen bleibt er fusselfrei und formbeständig, robust und dabei langlebig in seiner Farbbrillanz und Lichtechtheit. Er bietet die perfekte Balance zwischen Funktion, Optik und Komfort.

Durch eine gezielte Modifikation des Polyester-Moleküls ist der Stoff permanent feuerhemmend und schwer entflammbar. Diese Eigenschaft geht selbst durch Gebrauch, Wäsche und Alterung nicht verloren. Nach einem Brandfall gibt es kein Nachglimmen und nur sehr geringe Rauchgasentwicklung. Der Stoff wurde in einer Vielzahl nationaler und internationaler Brandschutz-Prüfverfahren getestet und zertifiziert.

Aufgrund der besonderen Materialeigenschaften kann die Pflegedecke auch Hausstauballergikern und Rheumatikern empfohlen werden. Die Pflegedecke ist CE-zertifiziert.

Grundsätzlich kann der Pflegeschlafsack in der folgenden Farbe geliefert werden.

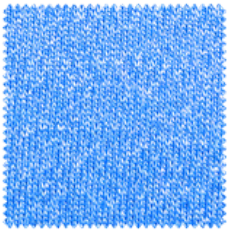

301 stahlblau

### PRODUKTMERKMALE

|   |   |  |
|---|---|--|
| Material  | 100% Polyester TREVIRA® CS-FR   |  |
| Farbe   | Stahlblau   |  |
| Lieferbar   | ab Lager Hamburg  |  |
| Produziert  | in Europa   |  |
| Feuertest<br>EN ISO 15025-2016<br>Abschnitt 5: Zündquelle | kleine offene Flamme<br>und glühende Zigarette  | dauerhaft bestanden, da Teil der Faser |
| Prüfung der<br>Formstabilität                             | Hervorragende Ergebnisse erzielt. Konstante Leistung nach 100 Wäschen.  |  |
| Pflege- und<br>Waschhinweise                              | <p>Separates Waschen mit geschlossenen Reißverschlüssen und geringer Desinfektionswaschmittelzugabe bei niedriger Temperatur von 60° C in der Waschmaschine. Das Produkt wegen der Flusenbildung anderer Wäschestücke separat waschen.</p> <p>Grundsätzlich ist das Material kochfest, d.h. Waschen ist bis 90° C möglich. Der Stoff ist bügelfrei und sollte nicht im Trockner getrocknet werden. Eine Trocknernutzung ist zwar möglich, aber nicht erforderlich. Wenn doch notwendig: Schonendere Behandlungsart mit reduzierter thermischer Belastung (Temperatur 60° C) und kürzerer Behandlungsdauer wählen.</p> <p>HINWEIS: Der Einsatz von Weichspülern zerstört die Materialeigenschaften.</p> <p>Nutzen Sie das Produkt nicht, wenn es beschädigt ist. Vor Gebrauch stets prüfen. Nicht in kontaminiertem Zustand liegen lassen, sondern sofort waschen. Bei Nichtgebrauch an einem kühlen, trockenen Ort ohne direkte Sonneneinstrahlung aufbewahren.</p> |  |



Vertrieb in Deutschland, Österreich und Schweiz durch:

**siNpress® GmbH**

Wellingsbüttler Weg 79 | D-22391 Hamburg

☎ +49 40 536 30 788 | 📠 +49 40 600 99 252

[info@siNpress.de](mailto:info@siNpress.de) | [www.siNpress.de](http://www.siNpress.de)

**Produkt: Pflege-Schlafsack**

**Artikel-Nr.: S305**



Der leichte, feuerhemmende Pflegeschlafsack ist speziell für unruhige und bettlägerige Bewohner geeignet und bietet die ideale Balance zwischen Schutz und Bewegungsfreiheit mit hohem Schlaf- und Ruhekomfort unter einer flauschigen Decke aus weichem Mikrofaserstoff.

Er verhindert das Freiliegen (keine Unterkühlung), das Kratzen an der Haut, das Verschmieren von Wunden etc. oder das Entfernen von Schutzhöschchen, Dauerkathetern. Die besondere Konstruktion verhindert, dass der Pflegebedürftige unbeabsichtigt aus dem Bett fallen oder beabsichtigt unkontrolliert das Bett verlassen kann.

**Merkmale & Vorteile**

- ✓ Der Pflegeschlafsack ist sehr benutzerfreundlich.
- ✓ Weite, bequeme Oberteile im T-Shirt-Format und lange seitliche Reißverschlüsse erleichtern das Anziehen des Schlafsacks.
- ✓ Sicherungen an den Reißverschlüssen.
- ✓ Volle Bewegungsfreiheit für den Patienten.
- ✓ Patient liegt warm und ist zugedeckt. Selbstständiges Ausziehen und damit verbundenes Auskühlen des Patienten kann vermieden werden.
- ✓ Am Rücken kann mit einem Gurt der Pflegeschlafsack am Bett fixiert werden.
- ✓ Keine Fixierung. Schlafsack wird gerne bei der Pflege von Demenzkranken eingesetzt.
- ✓ Spart Pflegezeit.
- ✓ Einheitsgröße und Unisex: für Männer und Frauen gleichermaßen geeignet.
- ✓ Die feuerhemmende Funktion ist dauerhaft in der Polyesterfaser verankert.
- ✓ Empfohlen für Hausstaub-Allergiker und Rheumatiker. Der Stoff benötigt sehr kurze Wasch- und Trockenzeiten, einen geringen Wasser- und Waschmittelverbrauch und führt damit zu reduzierten Kosten für den Unterhalt in der Betreuung.
- ✓ Die hydrophilen und antibakteriellen Eigenschaften des Polyestergewebes sorgen dafür, dass der Stoff Schweiß absorbiert und erhöht somit den Komfort für den Benutzer.
- ✓ Produziert nach OEKO-TEX® Standard 100 (Produktklasse II). Die Pflegedecke ist CE-zertifiziert.

**Für wen ist dieses Produkt geeignet?**

- ✓ Pflegeabteilungen, z.B. bei Demenz,
- ✓ Autismuspflege,
- ✓ Verhaltensgesundheitspflege,
- ✓ Psychiatrische Einrichtungen.

**Material**

100% Polyester gestrickte Mikrofaser TREVIRA® CS-FR

**Feuertest**

EN ISO 15025-2016 Abschnitt 5: Zündquelle

kleine offene Flamme und glühende Zigarette dauerhaft bestanden.

Prüfung der Formstabilität

Hervorragende Ergebnisse erzielt. Konstante Leistung nach 100 Wäschen.

**Produktmerkmale**

Größen

Einheitsgröße 190 x 70 cm

Farben

Stahlblau 301

Produziert in

Europa / lieferbar ab Lager Hamburg

**Pflege- und Waschinweise**

Maschinenwaschbar bis zu 60°C. Das Material ist kochfest, d.h. Waschen ist möglich bis 90°C. Dunkle Farben separat waschen. Nicht mit Weichspüler waschen. Nicht bleichen und nicht in den Trockner geben. Nicht bügeln. Nicht chemisch reinigen. Nutzen Sie das Produkt nicht, wenn es beschädigt ist. Vor Gebrauch stets prüfen. Nicht in kontaminiertem Zustand liegen lassen, sondern sofort waschen. Bei Nichtgebrauch an einem kühlen, trockenen Ort ohne direkte Sonneneinstrahlung aufbewahren. Wir empfehlen, stets die Reißverschlüsse während des Waschens zu schließen und das Produkt wegen der Flusenbildung anderer Wäschestücke separat zu waschen.



**Modelle**

Pflegeschlafsack

| S305  | AA301 | BA301 |
|-------|-------|-------|
| Größe | II    | II    |
| Ärmel | x     | ✓     |
| Farbe | 301   | 301   |

\* Größe II für normale und große Personen.



Pflegeschlafsack ohne Ärmel - S305AA301



Pflegeschlafsack mit Ärmel - S305BA301



**Vertrieb in Deutschland, Österreich und Schweiz durch:**

**siNpress® GmbH**

Wellingsbüttler Weg 79 | D-22391 Hamburg

☎ +49 40 536 30 788 | ☎ +49 40 600 99 252

✉ [info@siNpress.de](mailto:info@siNpress.de) | [www.siNpress.de](http://www.siNpress.de)

## PRODUKTKATALOG 2025

## PRODUKTE FÜR DIE PFLEGE



**PFLEGEDECKE**



**PFLEGESCHLAFSACK**



**PROTAC® KUGELDECKE™**

Vertrieb in Deutschland, Österreich und Schweiz durch:

**siNpress® GmbH**

Wellingsbüttler Weg 79 | D-22391 Hamburg

☎ +49 40 536 30 788 | 📠 +49 40 600 99 252

[info@siNpress.de](mailto:info@siNpress.de) | [www.siNpress.de](http://www.siNpress.de)



## Was Sie über die PROTAC® Produkte wissen sollten

**PROTAC®**  
INTEGRATING SENSES

Die PROTAC® KUGELDECKE™ ist ein Hilfs- und Therapiemittel zur sensorischen Integration für Kinder, Erwachsene und Senioren. Die Schwere der Decke gibt dem Körper das Signal, zur Ruhe zu kommen.

Alle PROTAC® Produkte enthalten Kunststoffkugeln, die durch tiefen Druck den Tastsinn, die sensorische Stimulation und die Tiefensensibilität aktivieren.

Die PROTAC® KUGELDECKE™ ist eine Gewichtsdecke, die die Wahrnehmung des Körpers und seiner Grenzen verbessert und ein Gefühl der Geborgenheit vermittelt. Das Wirkungsprinzip der KUGELDECKE™ besteht darin, dass die Kugeln in der Decke punktuell Druck auf den Körper ausüben und durch die gesamte Schwere der Bettdecke sowohl die Oberflächen- als auch die Tiefensensibilität stimuliert werden. Es entsteht ein großflächiger, angenehmer Druck auf den Körper, der beruhigend und ordnend wirkt. Der starke Berührungsreiz steigert die Körperwahrnehmung und bringt Entspannung, die viele Kinder und Erwachsene mit sensorischen Verarbeitungsstörungen suchen.

### PFLEGE UND THERAPIE

Die PROTAC® KUGELDECKE™ ist eine wertvolle Ergänzung in Pflege und Therapie und wird erfolgreich in Pflege- und Therapiekonzepte wie Bobath, Basale Stimulation® und Kinästhetik® integriert. Im Pflegealltag bietet sie vielfältige Möglichkeiten, die Wahrnehmungsfähigkeit der Patienten anzuregen, zu unterstützen und zu fördern, um z.B. Sicherheit zu vermitteln, innere Unruhe und Ängste abzubauen.

Die KUGELDECKE™ bietet vielfältige Einsatzmöglichkeiten für alle Menschen mit verminderter Körperwahrnehmung, körperlicher und psychischer Unruhe. Sie kann wie eine normale Bettdecke verwendet werden. Sie hilft und unterstützt auch zeitweise während des Tages oder am Abend, um zur Ruhe zu kommen.

### ANWENDUNGSBEISPIELE DER PROTAC® PRODUKTE

ADHS • Angstzustände • Anorexie • Autismus • Cerebral-Parese • Chorea Huntington (Veitstanz) • Chronische Schmerzen • Demenz • Depression • Entwicklungsstörungen • Hyperaktivität • Multiple Sklerose • Neurologische Erkrankungen • Parkinson • Psychosen • Rauschmittelkonsum • Schädel-Hirn-Traumen • Schlafstörungen • Schlaganfall • Stress • Tourette-Syndrom • Wahrnehmungsstörungen • u.a.

Die PROTAC® Produkte können in Heimen, Wohnungen, Tagesstätten, Krankenhäusern, Aufenthaltsräumen und Privaträumen eingesetzt werden. In Schulen kann die PROTAC® KUGELDECKE™ z.B. in Klassenzimmern und Gemeinschaftsräumen verwendet werden. In Privathäusern kann die PROTAC® KUGELDECKE™ z.B. im Schlafzimmer und im Wohnzimmer benutzt werden.

### VON FACHLEUTEN EMPFOHLEN

Pflegepersonal, Mediziner, Therapeuten und Eltern empfehlen die PROTAC® KUGELDECKE™. Die Decke mildert Hyperaktivität und Stress und wirkt sich positiv auf die sensorische Integration und die Motorik des Benutzers aus.

Vertrieb in Deutschland, Österreich und Schweiz durch:

**siNpress® GmbH**

Wellingsbüttler Weg 79 | D-22391 Hamburg

☎ +49 40 536 30 788 | 📠 +49 40 600 99 252

[info@siNpress.de](mailto:info@siNpress.de) | [www.siNpress.de](http://www.siNpress.de)

siNpress

**Produkt: PROTAC® KUGELDECKE™ CLASSIC**

**Artikel-Nr.: PR101**



Alle PROTAC® Produkte enthalten Kunststoffkugeln, die durch tiefen Druck den Tastsinn, die sensorische Stimulation und die Tiefensensibilität aktivieren.

Die PROTAC® KUGELDECKE™ CLASSIC ist die originale PROTAC® KUGELDECKE™ mit geräuscharmen 50 mm Kunststoffkugeln.

Die CLASSIC Serie eignet sich besonders für Personen, die variierende sensorische Eindrücke benötigen, um sich selbst wahrzunehmen und zur Ruhe zu kommen.

**Merkmale & Vorteile**

- ✓ Die PROTAC® KUGELDECKE™ mildert Hyperaktivität und Stress und wirkt sich positiv auf die sensorische Integration und die Motorik des Benutzers aus.
- ✓ Kugeldecken, die mit diesen 50 mm großen Kunststoffkugeln gefüllt sind, bieten die größtmögliche Schwere und Stimulation.
- ✓ Gewicht: ca. 7 KG.

**Für wen ist dieses Produkt geeignet?**

- ✓ Die PROTAC® KUGELDECKE™ CLASSIC wird vor allem bei Personen verwendet, die eine starke sensorische Stimulation benötigen. Z.B. bei Autisten, psychisch Kranken, Kindern mit AD(H)S-Problematik oder neurologisch erkrankten Personen.
- ✓ Die PROTAC® KUGELDECKE™ ist ein Hilfs- und Therapiemittel zur sensorischen Integration für Kinder, Erwachsene und Senioren.
- ✓ Die PROTAC® Produkte können in Heimen, Wohnungen, Tagesstätten, Krankenhäusern, Aufenthaltsräumen und Privaträumen eingesetzt werden. In Schulen kann die PROTAC® KUGELDECKE™ z.B. in Klassenzimmern und Gemeinschaftsräumen verwendet werden. In Privathäusern kann die PROTAC® KUGELDECKE™ z.B. im Schlafzimmer und im Wohnzimmer benutzt werden.

**Material**

|                            |  |
|----------------------------|--|
| Bezugsstoff                | 50 mm Kunststoffkugeln<br>100% Baumwolle / zertifiziert nach OEKO-TEX® Standard 100 Nr. 2076-310 DTI, Klasse I |
| Prüfung der Formstabilität | Hervorragende Ergebnisse erzielt. Konstante Leistung nach 100 Wäschen.   |



**Entspricht den allgemeinen Anforderungen für Hilfsmittel nach folgenden Standards**

|                           |                      |
|---------------------------|----------------------|
| Klinische Bewertung       | EN 12182:2012        |
| Risikomanagement          | DS/EN ISO 14971:2019 |
| Qualitätsmanagementsystem | EN ISO 13485:2016    |

**Produktmerkmale**

|               |                                       |
|---------------|---------------------------------------|
| Größe         | ca. 200 x 140 cm                      |
| Farben        | Weiss                                 |
| Gewicht       | ca. 7 KG                              |
| Produziert in | Dänemark / lieferbar ab Lager Hamburg |

**Pflege- und Waschinweise**



Maschinenwaschbar bis zu 60 °C. Die Häufigkeit und Notwendigkeit des Waschens hängt von der Anwendung und dem Gebrauch ab.

Die Classic-KUGELDECKE™ lässt sich in einer Waschmaschine mit einer Mindestkapazität von 16 KG (meist nur eine Industriewaschmaschine) mit Desinfektionswaschmittel ohne Bleichmittel waschen. Bei niedriger Drehzahl schleudern - siehe auch Waschanleitung im Beipack. Alternativ wird die Bettdecke chemisch gereinigt.

Bei der Entfernung von Flecken, für die Fleckenentferner verwendet werden müssen, zuerst an einer unauffälligen Stelle testen, ob der Stoff beschädigt oder die Farbe beeinträchtigt wird. PROTAC® rät von der Verwendung von Fleckenentfernern ab.

Es wird empfohlen, die Bettdecke regelmäßig zum Lüften aufzuhängen.

**Vertrieb in Deutschland, Österreich und Schweiz durch:**

**siNpress® GmbH**

Wellingsbüttler Weg 79 | D-22391 Hamburg

☎ +49 40 536 30 788 | ☎ +49 40 600 99 252

✉ [info@siNpress.de](mailto:info@siNpress.de) | [www.siNpress.de](http://www.siNpress.de)

**Produkt: PROTAC® KUGELDECKE™ FLEXIBLE**

**Artikel-Nr.: PR201**



Alle PROTAC® Produkte enthalten Kunststoffkugeln, die durch tiefen Druck den Tastsinn, die sensorische Stimulation und die Tiefensensibilität aktivieren.

Die PROTAC® KUGELDECKE™ FLEXIBLE ist in Taschen mit Kugelkammern mit losen Kugeln eingeteilt. Die Kugelkammern sind herausnehmbar.

Die FLEXIBLE-Serie eignet sich für Personen, die variierende sensorische Eindrücke benötigen, um sich selbst wahrzunehmen und zur Ruhe zu kommen.

**Merkmale & Vorteile**

- ✓ Die PROTAC® KUGELDECKE™ mildert Hyperaktivität und Stress und wirkt sich positiv auf die sensorische Integration und die Motorik des Benutzers aus.
- ✓ Die PROTAC® KUGELDECKE™ FLEXIBLE enthält in Kammern verteiltes Polypropylen-Granulat.
- ✓ Durch die Granulatfüllung schmiegt sie sich eng an den Körper an und sorgt für Schwere und Wärme.
- ✓ Dieses Modell hat ein größeres Volumen und eignet sich daher hervorragend für die Lagerung.
- ✓ Gewicht: ca. 3 KG.

**Für wen ist dieses Produkt geeignet?**

- ✓ Die PROTAC® KUGELDECKE™ FLEXIBLE mit einem Gewicht von ca. 3 KG wird im Allgemeinen für Personen empfohlen, die zusätzliche Wärme benötigen, insbesondere für ältere Menschen und Personen mit chronischen Schmerzen.
- ✓ Die PROTAC® KUGELDECKE™ ist ein Hilfs- und Therapiemittel zur sensorischen Integration für Kinder, Erwachsene und Senioren.
- ✓ Die PROTAC® Produkte können in Heimen, Wohnungen, Tagesstätten, Krankenhäusern, Aufenthaltsräumen und Privaträumen eingesetzt werden. In Schulen kann die PROTAC® KUGELDECKE™ z.B. in Klassenzimmern und Gemeinschaftsräumen verwendet werden. In Privathäusern kann die PROTAC® KUGELDECKE™ z.B. im Schlafzimmer und im Wohnzimmer benutzt werden.

**Material**

Taschen mit Kugelkammern mit losen Kugeln

**Bezugsstoff**

100% Baumwolle / zertifiziert nach OEKO-TEX® Standard 100 Nr. 2076-310 DTI, Klasse I

**Prüfung der Formstabilität**

Hervorragende Ergebnisse erzielt. Konstante Leistung nach 100 Wäschen.

**Entspricht den allgemeinen Anforderungen für Hilfsmittel nach folgenden Standards**

|                           |                      |
|---------------------------|----------------------|
| Klinische Bewertung       | EN 12182:2012        |
| Risikomanagement          | DS/EN ISO 14971:2019 |
| Qualitätsmanagementsystem | EN ISO 13485:2016    |

**Produktmerkmale**

|               |                                       |
|---------------|---------------------------------------|
| Größe         | ca. 200 x 140 cm                      |
| Farben        | Weiss                                 |
| Gewicht       | ca. 3 KG                              |
| Produziert in | Dänemark / lieferbar ab Lager Hamburg |

**Pflege- und Waschinweise**

Maschinenwaschbar bis zu 60°C. Die Häufigkeit und Notwendigkeit des Waschens hängt von der Anwendung und dem Gebrauch ab.



Die PROTAC® KUGELDECKE™ FLEXIBLE kann in Waschmaschinen mit einem Fassungsvermögen von mindestens 7 KG mit einem desinfizierenden Waschmittel ohne Bleichmittel gewaschen werden. Die Beutel werden vom Bezug getrennt. Bezug und Beutel werden getrennt gewaschen. Zum Waschen der Balltaschen wird ein Waschbeutel mitgeliefert. Bei niedriger Drehzahl schleudern - siehe auch Waschanleitung im Beipack.

Bei der Entfernung von Flecken, für die Fleckentferner verwendet werden müssen, zuerst an einer unauffälligen Stelle testen, ob der Stoff beschädigt oder die Farbe beeinträchtigt wird. PROTAC® rät von der Verwendung von Fleckentfernern ab.

Es wird empfohlen, die Bettdecke regelmäßig zum Lüften aufzuhängen.



**Vertrieb in Deutschland, Österreich und Schweiz durch:**

**siNpress® GmbH**

Wellingsbüttler Weg 79 | D-22391 Hamburg

☎ +49 40 536 30 788 | ☎ +49 40 600 99 252

✉ [info@siNpress.de](mailto:info@siNpress.de) | [www.siNpress.de](http://www.siNpress.de)

**Produkt: PROTAC® KUGELDECKE™ GRANULAT**

**Artikel-Nr.: PR419**



Alle PROTAC® Produkte enthalten Kunststoffkugeln, die durch tiefen Druck den Tastsinn, die sensorische Stimulation und die Tiefensensibilität aktivieren.

Die PROTAC® KUGELDECKE™ GRANULAT ist eine besondere Demenz- und Schmerzdecke, die ein auf 80 Kammern verteiltes Granulat enthält. Da sie den Körper fest umschließt, wird ein Gefühl der Sicherheit vermittelt.

Zum Waschen wird die PROTAC® KUGELDECKE™ GRANULAT durch zwei Reißverschlüsse in drei gleich große Teile geteilt. Jedes Teil kann einzeln in einer handelsüblichen Waschmaschine mit einem Fassungsvermögen von mindestens 7 KG mit desinfizierendem Waschpulver ohne Bleichmittel gewaschen werden.

**Merkmale & Vorteile**

- ✓ Die PROTAC® KUGELDECKE™ mildert Hyperaktivität und Stress und wirkt sich positiv auf die sensorische Integration und die Motorik des Benutzers aus.
- ✓ Die PROTAC® KUGELDECKE™ GRANULAT enthält ein Granulat und kleine Kügelchen, die auf 80 Kammern verteilt sind.
- ✓ Durch die Granulatfüllung passt sie sich den Körperkonturen sehr gut an und umschließt den Benutzer. Sie bietet eine sanftere taktile Stimulation, da der punktuelle Druck nicht so stark ist.
- ✓ Es handelt sich um eine schwere Decke, die sich wie eine gewöhnliche Bettdecke anfühlt.
- ✓ Sie lindert Angst und Unruhe und kann auch zur Lagerung verwendet werden.
- ✓ Gewicht: ca. 5 KG.

**Für wen ist dieses Produkt geeignet?**

- ✓ Die PROTAC® KUGELDECKE™ GRANULAT eignet sich besonders für Menschen mit chronischen Schmerzen, kognitiven Beeinträchtigungen und Erschöpfungszuständen.
- ✓ Die GRANULAT-Bettdecke eignet sich auch für Menschen, die eine engere Umhüllung ihres Körpers benötigen oder denen größere Kunststoffkügelchen unangenehm sind.
- ✓ Die PROTAC® KUGELDECKE™ ist ein Hilfs- und Therapiemittel zur sensorischen Integration für Kinder, Erwachsene und Senioren.
- ✓ Die PROTAC® Produkte können in Heimen, Wohnungen, Tagesstätten, Krankenhäusern, Aufenthaltsräumen und Privaträumen eingesetzt werden. In Schulen kann die PROTAC® KUGELDECKE™ z.B. in Klassenzimmern und Gemeinschaftsräumen verwendet werden. In Privathäusern kann die PROTAC® KUGELDECKE™ z.B. im Schlafzimmer und im Wohnzimmer benutzt werden.



**Material**

Bezugsstoff

Granulat und kleine Kügelchen, die auf 80 Kammern verteilt sind  
100% Baumwolle / zertifiziert nach OEKO-TEX® Standard 100 Nr. 2076-310 DTI, Klasse I

Prüfung der Formstabilität

Hervorragende Ergebnisse erzielt. Konstante Leistung nach 100 Wäschen.

**Entspricht den allgemeinen Anforderungen für Hilfsmittel nach folgenden Standards**

|                           |                      |
|---------------------------|----------------------|
| Klinische Bewertung       | EN 12182:2012        |
| Risikomanagement          | DS/EN ISO 14971:2019 |
| Qualitätsmanagementsystem | EN ISO 13485:2016    |

**Produktmerkmale**

|         |                  |
|---------|------------------|
| Größe   | ca. 200 x 140 cm |
| Farben  | Weiss            |
| Gewicht | ca. 5 KG         |

Produziert in Dänemark / lieferbar ab Lager Hamburg

**Pflege- und Waschinweise**



Maschinenwaschbar bis zu 60°C. Die Häufigkeit und Notwendigkeit des Waschens hängt von der Anwendung und dem Gebrauch ab.

Zum Waschen kann die PROTAC® KUGELDECKE™ GRANULAT durch zwei Reißverschlüsse in drei gleich große Teile geteilt werden. Die Granulat-KUGELDECKE™ wird geteilt und jedes Teil in einer handelsüblichen Waschmaschine mit einem Fassungsvermögen von mindestens 7 KG mit desinfizierendem Waschpulver ohne Bleichmittel gewaschen. Den mitgelieferten Wäschebeutel verwenden. Nicht mit Weichspüler waschen. Bei niedriger Drehzahl schleudern - siehe auch Waschanleitung im Beipack.

Bei der Entfernung von Flecken, für die Fleckentferner verwendet werden müssen, zuerst an einer unauffälligen Stelle testen, ob der Stoff beschädigt oder die Farbe beeinträchtigt wird. PROTAC® rät von der Verwendung von Fleckentfernern ab.

Es wird empfohlen, die Bettdecke regelmäßig zum Lüften aufzuhängen.



**Vertrieb in Deutschland, Österreich und Schweiz durch:**

**siNpress® GmbH**

Wellingsbüttler Weg 79 | D-22391 Hamburg

☎ +49 40 536 30 788 | ☎ +49 40 600 99 252

✉ info@siNpress.de | [www.siNpress.de](http://www.siNpress.de)

**Produkt: PROTAC® KUGELDECKE™  
INKONTINENZBEZUG**



**Artikel-Nr.: PR302**

**Zubehör**

Der PROTAC® KUGELDECKE™ Inkontinenzbezug wird bei Inkontinenzproblemen über die KUGELDECKE™ gezogen.

KUGELDECKE™ und Inkontinenzbezug sollten dann mit einem normalen Bettbezug bezogen werden, damit das Liegen unter bzw. auf der KUGELDECKE™ angenehmer wird.

Der Inkontinenzbezug besteht aus 100 % Polyester mit einer PU-Beschichtung, die ein Durchfeuchten der gesamten Decke verhindert und trotzdem die Haut atmen lässt. Am unteren Ende und an einer Seite des Inkontinenzbezugs befindet sich ein Reißverschluss, der das Überziehen über die KUGELDECKE™ erleichtert.



**Merkmale & Vorteile**

- ✓ Wasserdicht. Keine Flüssigkeiten wie Urin und Blut oder ähnliches können durch den Bezug gelangen.
- ✓ Abwaschbar und resistent gegen Desinfektionsmittel. Auf diese Weise können Verunreinigungen, wie Blut, Urin, Fette, Öle, Creme-Rückstände einfach abgewischt und die Oberfläche hygienisch mit Desinfektionsmittel gereinigt werden.
- ✓ Der Bezug hat an 2 Seiten einen Reißverschluss. So lässt er sich schnell und mit wenigen Handgriffen auf- und abziehen.
- ✓ Die erwartete Lebensdauer des Produkts beträgt ca. 5 Jahre.
- ✓ Gewicht: ca. 700 G.

**Für wen ist dieses Produkt geeignet?**

- ✓ Bei Inkontinenzproblemen mit der PROTAC® KUGELDECKE™.

**Material**

Polyester mit einer Polyurethan-Beschichtung

Prüfung der Formstabilität

Hervorragende Ergebnisse erzielt. Konstante Leistung nach 100 Wäschen.

**Entspricht den allgemeinen Anforderungen für Hilfsmittel nach folgenden Standards**

|                           |                      |
|---------------------------|----------------------|
| Klinische Bewertung       | EN 12182:2012        |
| Risikomanagement          | DS/EN ISO 14971:2019 |
| Qualitätsmanagementsystem | EN ISO 13485:2016    |

**Produktmerkmale**

|               |                                       |
|---------------|---------------------------------------|
| Größe         | ca. 205 x 145 cm                      |
| Farben        | Weiss                                 |
| Gewicht       | ca. 700 G                             |
| Produziert in | Dänemark / lieferbar ab Lager Hamburg |

**Pflege- und Waschinweise**

Maschinenwaschbar bis zu 90 °C. Die Häufigkeit und Notwendigkeit des Waschens hängt von der Anwendung und dem Gebrauch ab.

Der PROTAC® Inkontinenzbezug lässt sich in einer Waschmaschine mit einer Mindestkapazität von 8 KG mit Desinfektionswaschmittel ohne Bleichmittel waschen. Nicht mit Weichspüler waschen. Trocknen im Wäschetrockner bei max. 30 °C oder an der Luft.

Fleckentfernungsmittel dürfen nicht benutzt werden, da sie die PU-Beschichtung beschädigen können.

Zur Nutzung eines Waschbeutels wird geraten.

Der PROTAC® KUGELDECKE™ Inkontinenzbezug wird in einem verschlossenen Kunststoffbeutel geliefert. Wenn der Inkontinenzbezug nicht gebraucht wird, sollte er ordentlich in dem Kunststoffbeutel aufbewahrt werden, sodass er vor Schmutz und Feuchtigkeit geschützt ist.



**Vertrieb in Deutschland, Österreich und Schweiz durch:**

**siNpress® GmbH**

Wellingsbüttler Weg 79 | D-22391 Hamburg

☎ +49 40 536 30 788 | ☎ +49 40 600 99 252

✉ [info@siNpress.de](mailto:info@siNpress.de) | [www.siNpress.de](http://www.siNpress.de)



## SINPRESS® - LEBENSQUALITÄT AUCH IM PFLEGEFALL

### Wir sind bereit, um Ihnen zu helfen.

Unsere Lösungen sind ideal für Umgebungen mit geringer Zurückhaltung. Bei siNpress® konzentrieren wir uns auf konzeptionelles Arbeiten und bieten individuelle Betreuung für pflegebedürftige und schwerstpflegebedürftige Menschen. Durch kontinuierlichen Austausch mit Pflegefachkräften und ständige Beobachtung der neuesten Entwicklungen in der Pflege bieten wir Ihnen bei siNpress® jederzeit hochwertige Maßnahmen für Patienten und Bewohner. Bei siNpress® verstehen wir die Bedeutung der richtigen Schutzausrüstung, die auf die spezifischen Anforderungen Ihres Teams zugeschnitten ist.

**Fordern Sie gern unsere Preisliste an:** Senden Sie uns eine E-Mail an [preisliste@siNpress.de](mailto:preisliste@siNpress.de). Unser Team kümmert sich umgehend um Ihre Anfrage und stellt Ihnen die gewünschten Informationen schnell und zuverlässig zur Verfügung.

Um Ihnen bei der Auswahl der optimalen Lösung zu helfen, bieten wir eine kostenlose telefonische Beratung zu unseren Produkten an.

### SO UNTERSTÜTZEN WIR SIE SCHNELL UND UNKOMPLIZIERT:

**Schicken Sie uns eine E-Mail:** Kontaktieren Sie uns unter [info@siNpress.de](mailto:info@siNpress.de) und teilen Sie uns einige grundlegende Informationen über Ihre Organisation mit.

**Stellen Sie Ihre Fragen:** Teilen Sie uns mit, an welchen Produkten Sie besonders interessiert sind, seien es Pflegedecken, reißfeste Bekleidung, Bettwaren oder bissfeste Schutzkleidung. Wir sind bereit, Ihnen bei Ihrem Anliegen zu helfen.

**Wir werden uns mit Ihnen in Verbindung setzen:** Eines unserer engagierten Teammitglieder wird rasch auf Ihre Anfrage reagieren und einen passenden und kostenfreien telefonischen Beratungstermin vereinbaren.

Während des Telefonats erhalten Sie einen detaillierten Einblick in unsere Produkte, verstehen ihre Funktionen und sehen, wie sie am besten in Ihrer Umgebung eingesetzt werden können. Wir stehen auch zur Beantwortung Ihrer Fragen bereit und geben Empfehlungen basierend auf Ihren speziellen Anforderungen.

**Folgen Sie uns  
auf  
Social Media:**



**Vertrieb in Deutschland, Österreich und Schweiz durch:**

**siNpress® GmbH**

Wellingsbüttler Weg 79 | D-22391 Hamburg

☎ +49 40 536 30 788 | 📠 +49 40 600 99 252

[info@siNpress.de](mailto:info@siNpress.de) | [www.siNpress.de](http://www.siNpress.de)

siNpress